




SIMULADOR RCP PRACTI-MAN Advance

ESENCIAL EN CAMPAÑAS DE FORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DESTACADAS



➤ DOS SIMULADORES EN UNO

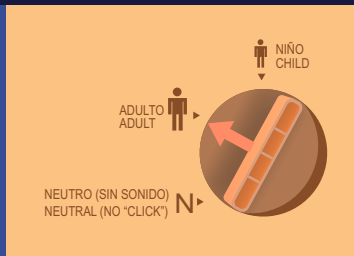

➤ SELECTOR EXCLUSIVO
CON TRES POSICIONES



➤ FUNCIÓN DE RESPIRACIÓN:
PERMITE LA PRÁCTICA REAL



➤ TRACCIÓN MANDIBULAR



➤ FORMACIÓN DEA



➤ MÁXIMA HIGIENE

RECOMENDACIONES DE USO Y LIMPIEZA DEL PRACTI-MAN ADVANCE

El fabricante recomienda el uso individual de los complementos durante la formación. Una correcta limpieza del simulador y el uso de los complementos, asegura una máxima higiene y previene posibles contagios de los alumnos durante la práctica.

El sistema de la válvula ayuda a prevenir posibles contagios durante la formación. Es recomendable cambiar el pulmón después de cada sesión de entrenamiento e higienizar la válvula siguiendo las indicaciones del manual.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL PRACTI-MAN ADVANCE



La protección durante la formación se complementa con el uso de la mascarilla protectora para la práctica de boca a boca.



Una vez finalizada la práctica se debe cambiar la válvula y la bolsa pulmonar utilizada. Para ello, retira la cabeza y quita la válvula y la bolsa pulmonar. A continuación sustitúyelas.



Es necesario limpiar el simulador desinfectando los labios y la cara separando la piel del rostro de la cabeza después de cada ejercicio realizado por un alumno.



Para una desinfección más completa separa el rostro de la cabeza y sumerge la creta en un recipiente con un producto desinfectante.

INSTRUCCIONES DE USO



Retirar la piel del torso.



Retirar la piel de la cara.



Unir la cabeza al torso mediante los dos toques de sujeción.



Pasar el pulmón por debajo de la mandíbula



Unir la válvula al pulmón.



Encajar la válvula correctamente.



Colocar el pulmón sobre el pecho mediante la pegatina en la marca circular y comprobar que descansa holgadamente sobre el cuello.



Colocar la piel sobre la cabeza. Encajar la pestaña en la parte superior y fijar correctamente la nariz.



Colocar la piel del torso.

CERTIFICADO DE GARANTIA

